

# オキシフローメジャー OXI-Flow Measure

型番: KM-X3L

## 取扱説明書



### 注意事項

- 手指以外では測定しないでください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を装着したまま MRI 検査や CT 検査を行わないでください。
- 本体が水などで濡れた状態で測定しないでください。
- 可燃性ガスや高濃度酸素内では使用しないでください。爆発や火災発生の恐れがあります。
- 同じ指で 1 時間以上使用しないでください。
- 浮腫や圧痛のある部位には、本製品を装着しないでください。
- 分解や修理、改造をしないでください。
- 血圧計と同時に本製品を使用しないでください。
- 本製品を落下させたり、過度の力を加えないでください。
- 本製品は、成人用です。新生児乳幼児に使用しないでください。
- 本製品を直射日光に当たる場所で保管、または使用をしないでください。
- 本製品はウェルネス管理を目的とするスポーツ用品・ウェアラブル機器であり、医療機器ではありません。また、本製品による計測機能は一般的な健康維持を目的としたものであり、医療目的での使用および診断をするためのものではありません。健康上の問題や質問がある場合は、医療の専門家に必ず相談してください。

## 各部説明



電源が入った状態で、再度電源ボタンを押すと画面表示を手前と奥とで反転することができます。

## 仕様表

機能	血中酸素ウェルネス測定 脈拍測定 自動電源オフ機能
血中酸素ウェルネス測定範囲	0%～99%
血中酸素ウェルネス測定精度	70～100%±2%
脈拍測定範囲	30～249 bpm
脈拍測定精度	±2bpm
電源	単 4 形 アルカリ乾電池 × 2 本(別売)
本体重量	約 30g(単 4 形乾電池 2 本含まず)
外形寸法	約 58 × 32 × 32 mm
使用環境温湿度	5～40℃ 15～80%
保管環境温湿度	-10～55℃ 95%以下
保証期間	1 年間
製品内容	製品本体 ストラップ 取扱説明書 保証書

\* 本製品はウェルネス管理を目的とするスポーツ用品・ウェアラブル機器であり、医療機器ではありません。

## 正しく測定するための確認事項

測定前に手を洗い、乾燥させて清潔な状態で測定してください。
指を温めてください。(指が冷えていると正確に測定できない場合があります。)
測定中は、装着が不安定にならないよう、安静な状態を保ってください。 また、強く圧力を加えたり、強く握ったりしないでください。
測定中に動いたりしないでください。
指には、マニキュアやハンドクリームを塗らないでください。
指を挿入する際は、指の向きを確認し製品の奥まで入れてください。
正しい計測を行うため、計測時は胸に近くなるように腕を伸ばしきらないようにしてください。

## ご使用方法

事前準備:

あらかじめ製品本体の裏ブタをスライドして取り外し、別売りの単4形アルカリ乾電池2本を取り付けてください。



1  
本製品の端をつまんで、クリップのように開きます。



2  
指ホルダに指の腹を下側に向けて奥に触れるまで入れてください。



3  
机の上などの平面に手を置き、電源ボタンを押して測定を開始します。この時、手や体を動かさないようにしてください。



4  
数秒後、血中酸素ウェルネス値と脈拍数が表示されます。